

ユーロダームドレープ *Euroderm Drape*

単回使用汎用サージカルドレープ

特徴:

- 術創周辺に水溶液、バクテリアの透過を防ぎコンタミネーションを防ぐ効果的なバリアーを作ります。
- 使用されているポリウレタンフィルムは、ロール状で接着性に優れ、手術部位の透明性を確保し、静電気の発生を防止します。
- 通気性及び水蒸気透過性に優れドレープ下の蒸れを防ぎます。
- フィルム特性により従来貼付が難しいとされていた部位にも、簡単に付着できます。
- フィルムは十分な強度及びバリアー性を備えています。メスで容易にカットできます。
- ラテックスフリーです。



使用方法例



1. 手術術部を消毒・乾燥後、ユーロダームを滅菌袋から取り出し、巻き戻らないように保持して下さい。
2. フィルムと皮膚の間に空気が入らないように、またしわにならないように注意して、フィルムが伸びない様に **引っ張らず***、片側から押し付けるように貼り付けます。特に切開予定線は、滅菌ガーゼ等で押さえしっかりと貼り付けます。***引っ張って貼り付けるとメスでフィルムをカットした際、フィルムが収縮して剥がれ易くなります。**



3. 最後に青テープ部のリリースライナー(白い紙)を剥がして、青テープ部を貼り付けて固定して下さい。

保管方法: 湿度の少ないかつ熱源からは離れた場所に保管下さい。包装は滅菌性を保持する為に傷つけないで下さい。

使用期限: 包材にダメージがなければ、使用期限は滅菌日より5年です。

使用上の注意: 1.単回使用で再使用禁止です。

2.包装に傷があれば使用しないで下さい。

3.ポリウレタン、ポピドンヨード液にアレルギーのある方には使用しないで下さい。

使用されている粘着剤: ポピドンヨード配合ポリアクリル接着剤

*パッチテスト試験成績についてはお問い合わせ下さい。

製造販売届出番号:13B1X00008000027

EOG 滅菌

品番	大きさ(全体) cm	大きさ(フィルム部分) cm	入数/箱
717910	10 x 24	10 x 18	10
717942	42 x 42	42 x 36	
717945	45 x 55	45 x 49	
717960	60 x 52	60 x 46	
717980	80 x 60	80 x 54	

	ユーロダーム
材質	ポリウレタン(PU)
特性	水蒸気透過性
水分透過性	1800g/m ² /24 時間
利点 (他社品と比べて)	蒸れない
	柔らかい
	剥がし易い
	皮膚に優しい

製造販売業者

株式会社フジメディカル

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http://www.fuji-medical.co.jp

販売代理店

本カタログの製品仕様は改良等により予告なしに変更することがあります。2019.11