


エコープローブカバーII

経食道用

＜人体開口部・術中用超音波プローブカバー＞

- 経食道心エコー(TEE)用の滅菌プローブカバーです。画質の低下が少なく、清潔に操作できます。
- TEE プローブに残留した消毒液による粘膜損傷のリスクを低減します。
- ポリウレタン製なのでアレルギーになりません。

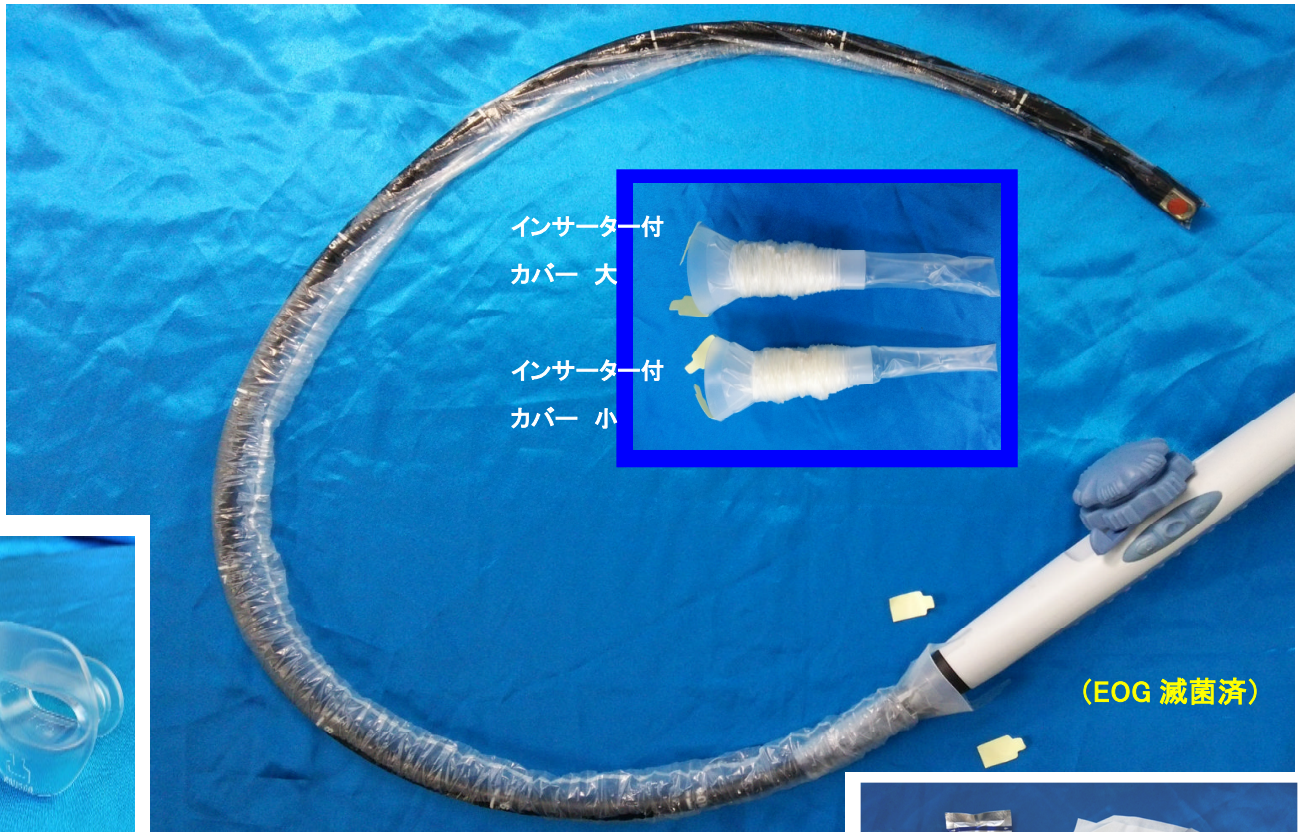

内容物

- ・滅菌ジェル(20g)
- ・ドレープ
- ・インサーター付カバー
(テープ2枚付、1枚予備)

別売:ソフトマウスピース

医療機器届出番号: 13B1X00008000030

品番	仕様	包装
PE0026	エコープローブカバーII 経食道用(大) 先端全周 45mm X 全長 122cmタイプ	12 セット/箱
PE0025	エコープローブカバーII 経食道用(小) 先端全周 33mm X 全長 122cmタイプ	12 セット/箱

医療機器認証番号: 225AIBZX00004000

製造販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

販売代理店

【使用方法例】


1. 滅菌バッグ及び内側のドレープ包装から、インサーター付カバー及び滅菌ジェルを取り出します



2. インサーターを持って、プローブカバー先端に適量の滅菌ジェルを塗付します。



3. TEEプローブをインサーターから挿入し、カバーをケーブルに沿って延ばしながら、カバー先端まで挿入します。

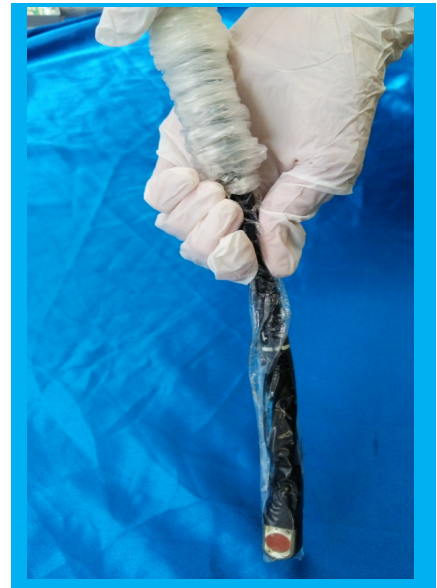

4. カバー先端に気泡が入らないように、またカバー繋ぎ目がレンズに掛からないように滅菌ジェルでカバー先端を密着させます。

5. インサーターをTEEプローブ胴体に付属のテープで固定します。必要に応じて予備テープを使用してください。

