

骨盤臓器脱用ペッサリー

# Milex ペッサリー

身体に優しいシリコン素材です。  
汎用性のある5種類と豊富なサイズを揃えました。



Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコン製で、生体適合性に最も優れた、安全な素材でできています。シリコンは、臭いや分泌物を吸収せず、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、定期的に滅菌し、清潔にすることができます。

汎用性の高いリングタイプに加えて、サポート付きリングタイプや、尿失禁防止にもなるノブ付きリングタイプを揃えました。また、少し進んだケースに使用するドーナツタイプやゲルホーンタイプも揃えました。各サイズも豊富にあり、身体に最もフィットする最適な製品を選ぶことができます。

Milex ペッサリーは、世界で最も信頼され使用されているクーパースージカル社の MILEX 製品です。


# Milex ペッサリー

Milex ペッサリーには5種類のユニークなタイプを取り揃えてあります。またサイズも豊富です。リングタイプ、サポートリングタイプ、ノブ付きリングタイプは軽度(1度及び2度の骨盤臓器脱)な場合に最適で、かつノブ付きは腹圧性尿失禁の予防にも効果があります。少し進んだケース(2度及び3度の骨盤臓器脱)やリングタイプがうまくフィットしない場合には、ドーナツタイプやゲルホーンタイプが適しています。いずれも医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導により身体にフィットしたタイプ・サイズをお選びください。


## ノブ付きリング



## ドーナツ

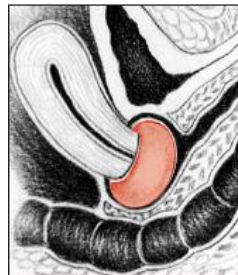

## ゲルホーン

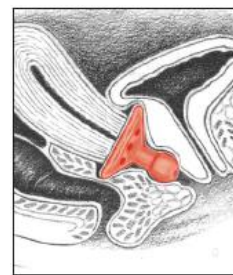

### 【使用上の注意】

- 本製品は、使用前に滅菌水にて十分洗浄し、乾燥させてから使用してください。
- 本製品の使用は、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導の下に行ってください。
- 本製品のサイズは、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導により適切なサイズを判定してください。
- 膣内に炎症や出血、感染がある場合は使用しないでください。
- 本製品を取り外した後は、必ず出血や感染がないかを観察し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

### ■Milex ペッサリー (カタログ番号・形状)



| サイズ | 外径(mm) | リング     | ノブ付きリング  | サポートリング | サイズ            | 外径(mm) | ドーナツ    | サイズ | 外径(mm) | ゲルホーン   |
|-----|--------|---------|----------|---------|----------------|--------|---------|-----|--------|---------|
| 00  | 44     | MXPER00 | MXPERK00 | MXPRS00 | 00             | 51     | MXPDO00 | 00  | 38     | MXPGE00 |
| 01  | 51     | MXPER01 | MXPERK01 | MXPRS01 | 01             | 57     | MXPDO01 | 01  | 44     | MXPGE01 |
| 02  | 57     | MXPER02 | MXPERK02 | MXPRS02 | 02             | 64     | MXPDO02 | 02  | 51     | MXPGE02 |
| 03  | 64     | MXPER03 | MXPERK03 | MXPRS03 | 03             | 70     | MXPDO03 | 03  | 57     | MXPGE03 |
| 04  | 70     | MXPER04 | MXPERK04 | MXPRS04 | 04             | 76     | MXPDO04 | 04  | 64     | MXPGE04 |
| 05  | 76     | MXPER05 | MXPERK05 | MXPRS05 | 05             | 83     | MXPDO05 | 05  | 70     | MXPGE05 |
| 06  | 83     | MXPER06 | MXPERK06 | MXPRS06 | 06             | 89     | MXPDO06 | 06  | 76     | MXPGE06 |
| 07  | 89     | MXPER07 | MXPERK07 | MXPRS07 | 07             | 95     | MXPDO07 | 07  | 83     | MXPGE07 |
| 08  | 95     | MXPER08 | MXPERK08 | MXPRS08 |                |        |         | 08  | 89     | MXPGE08 |
| 09  | 102    | MXPER09 | MXPERK09 | MXPRS09 | 外径はリング部の外径(mm) |        |         | 09  | 95     | MXPGE09 |
| 10  | 108    | MXPER10 | MXPERK10 | MXPRS10 |                |        |         |     |        |         |

製造元: コーパースージャカル社(米国)

一般的名称: 避妊用ペッサリー(35237000)

医療機器認証番号: 226AIBZX00058000

製造販売元:

**株式会社フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店: