

Milexペッサリー フィットtingキット

最適な Milex ペッサリーを選択するための専用フィットtingキット(練習用マネキン付)です。



- 装着方法は Milex ペッサリーと同様です。Milex ペッサリーの添付文書をお読みください。
- 本製品は、使用前に十分洗浄し、乾燥させてから使用してください。
- 消毒・滅菌方法:
中性洗剤を使用し純水で十分に濯いだ後、グルタルアルデヒド消毒薬(例:CIDEX OPA で12分間浸水)で消毒後、純水で濯いだ後、下記条件で湿熱滅菌(オートクレーブ)することを推奨します。
前処理 132°C~135°C 4分間
陰圧処理 121°C~124°C 40分間
- 滅菌後、乾燥状態で保管します。(無菌状態で保管する必要はありません。)

【使用上の注意】

- リングタイプ、サポートリングタイプのサイズ選択はサポートリングタイプを使用してください。
- ノブ付きリングタイプのサイズ選択はサポートリングタイプ*を使用してください。
*その際は、サポートリングタイプより約13mm(1/2インチ)大きいサイズを選択してください。
- ドーナツタイプはドーナツタイプの、ゲルホーンタイプはゲルホーンタイプのフィットtingキットを使用してください。
- フィットtingキットはシリコン製ですが、15分以上装着しないでください。
- サポートディッシュタイプ、キューブタイプを使用するペッサリーは販売していませんので使用しません。

商品番号	商品名	包装単位
MXFIT-CA	Milex ペッサリーフィットtingキット	1セット

■ Milexペッサリー

(形状/商品番号)



サイズ	外径(mm)	リング	ノブ付きリング	サポートリング	サイズ	外径(mm)	ドーナツ	サイズ	外径(mm)	ゲルホーン
00	44	MXPER00	MXPERK00	MXPRS00	00	51	MXPDO00	00	38	MXPGE00
01	51	MXPER01	MXPERK01	MXPRS01	01	57	MXPDO01	01	44	MXPGE01
02	57	MXPER02	MXPERK02	MXPRS02	02	64	MXPDO02	02	51	MXPGE02
03	64	MXPER03	MXPERK03	MXPRS03	03	70	MXPDO03	03	57	MXPGE03
04	70	MXPER04	MXPERK04	MXPRS04	04	76	MXPDO04	04	64	MXPGE04
05	76	MXPER05	MXPERK05	MXPRS05	05	83	MXPDO05	05	70	MXPGE05
06	83	MXPER06	MXPERK06	MXPRS06	06	89	MXPDO06	06	76	MXPGE06
07	89	MXPER07	MXPERK07	MXPRS07	07	95	MXPDO07	07	83	MXPGE07
08	95	MXPER08	MXPERK08	MXPRS08				08	89	MXPGE08
09	102	MXPER09	MXPERK09	MXPRS09	外径はリング部の外径(mm)			09	95	MXPGE09
10	108	MXPER10	MXPERK10	MXPRS10						

製造元: クーパーサージカル社(米国)

一般的名称: 避妊用ペッサリー(35237000)

医療機器認証番号: 226AIBZX00058000

* カラーマーク部分はフィットtingキットに該当するサイズです。

製造販売元: **株式会社フジメディカル**

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
http://www.fuji-medical.co.jp

販売代理店: