

# カメラスリーブ


——— カメラヘッド及びコードを滅菌カバーします ———

- 緊急手術にも対応できます
- 滅菌によるカメラヘッドの劣化を防止します
- カメラヘッドの滅菌が不要になり、滅菌費用の削減になります



テープ (1)

テープ (2)

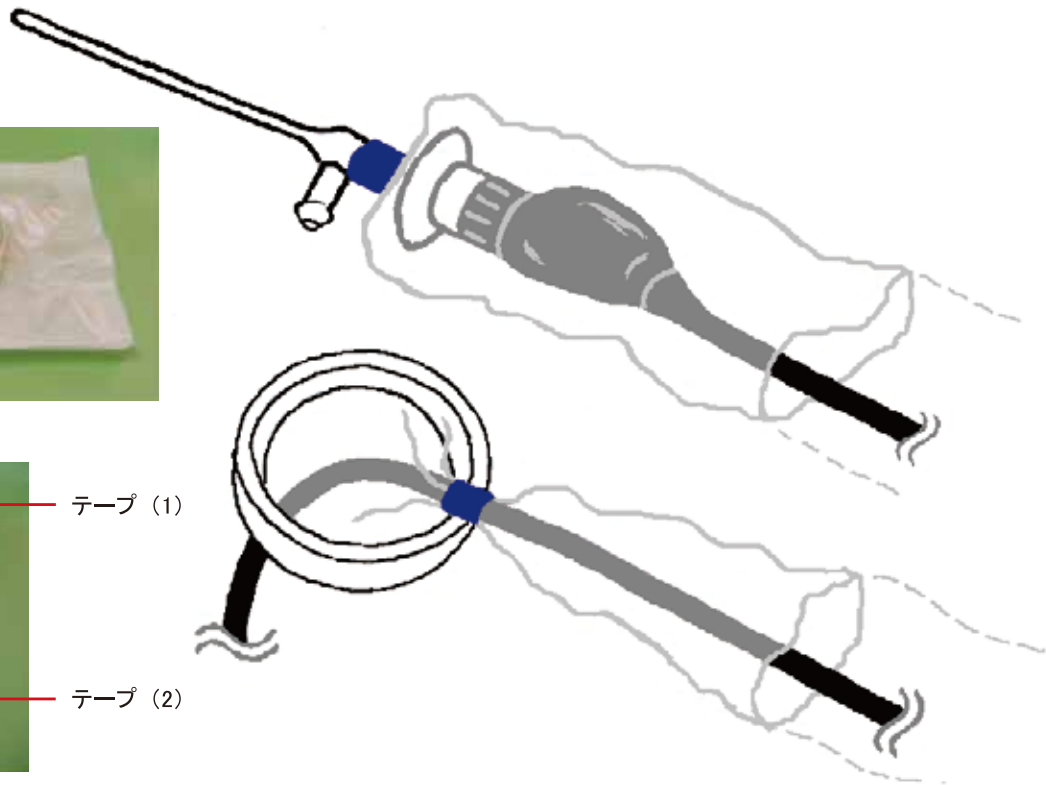

## 使用方法

1. 滅菌袋を開けます。
2. カメラヘッドを板紙の開口部に挿入し、青色の粘着テープ (1) で巻いてスリーブを固定します。板紙を取り外します。
3. カメラヘッドを保持しながら、リングをケーブルの全長に渡り押し下げます。スリーブの表面が不潔にならないように注意します。
4. リングに付着しているテープ (2) でケーブル他端にスリーブを固定します。そうすることにより、使用中にケーブルの露出を防止します。



品番	形状	包装
P09072	長さ：2.55m	20個 / 箱

輸入販売元

**株式会社フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店