

# ユーロダームドレープ *Euroderm Drape*


単回使用汎用サージカルドレープ

**特徴:**

- 術創周辺に水溶液、バクテリアの透過を防ぎコンタミネーションを防ぐ効果的なバリアーを作ります。
- 使用されているポリウレタンフィルムは、ロール状で接着性に優れ、手術部位の透明性を確保し、静電気の発生を防止します。
- 通気性及び水蒸気透過性に優れドレープ下の蒸れを防ぎます。
- フィルム特性により従来貼付が難しいとされていた部位にも、簡単に付着できます。
- フィルムは十分な強度及びバリアー性を備えていますが、メスで容易にカットできます。
- ラテックスフリーです。




## 使用方法

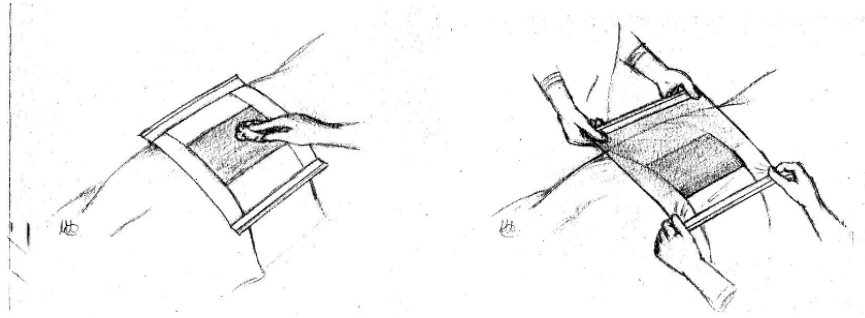

1. 手を洗浄消毒した後、術部を消毒して下さい。

2. ユーロダームを滅菌袋から取り出し、巻き戻らないように保持して下さい。

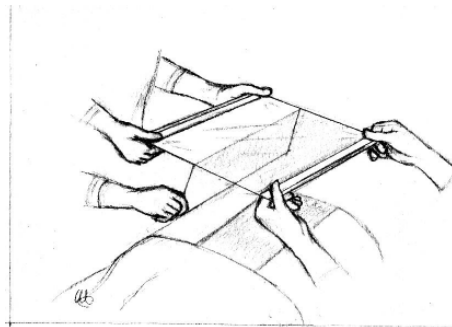

3. 下部のリリースライナー（黄色い紙）を取外して下さい。



4. 皺にならないように注意して患部に貼り付けて下さい。

**保管方法:** 湿度の少ないかつ熱源からは離れた場所に保管下さい。包装は滅菌性を保持する為に傷つけないで下さい。

**使用期限:** 包材にダメージがなければ、使用期限は滅菌日より5年です。

**使用上の注意:** 1. シングルユーズです。

2. 包装に傷があれば使用しないで下さい。

3. ポリウレタン、ポピドンヨード液にアレルギーのある方には使用しないで下さい。

**使用されている粘着剤:** ポピドンヨード配合ポリアクリル接着剤

\*パッチテスト試験成績についてはお問い合わせ下さい。

製造販売届出番号: 13B1X00008000027

EOG 滅菌

品番	大きさ(全体) cm	大きさ(フィルム部分) cm	入数/箱
717910	10 x 24	10 x 18	10
717942	42 x 42	42 x 36	
717945	45 x 55	45 x 49	
717960	60 x 52	60 x 46	
717980	80 x 60	80 x 54	

	ユーロダーム
材質	ポリウレタン(PU)
特性	水蒸気透過性
水分透過性	1800g/m <sup>2</sup> /24時間
利点(他社品と比べて)	蒸れない
	柔らかい
	剥がれにくい
	皮膚に優しい

製造販売業者

**株式会社フジメディカル**

〒160-0004

東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380

http://www.fuji-medical.co.jp

販売代理店