

医療用廃棄物収納システム

**Sharpsafe™**

● シャープセイフは英国及び仏国安全基準適合品です。

# シャープセイフ

医療従事者を針刺し事故から守る。



## 在宅から手術室まで、場所・用途に応じて選べる9 アイテム

ペン型注射器用針や血糖値測定用穿刺針など針専用の廃棄容器です。ワンプッシュで針外し口を開閉でき、外出時の自己注射にも便利な携帯サイズです。

往診や訪問看護など在宅医療に適したサイズです。持ち運びに便利なハンドル付きです。ワンプッシュで開閉でき、針付きシリンジや翼状針を廃棄できます。

注射針を取り外すための針外し口と、シリンジや翼状針をそのまま廃棄できる投入口が付いています。専用のスタンドで固定して使用できます。ペン型注射器用針の取り外し口も備えており、インシュリン用シリンジの廃棄にも適しています。



0.2リットル

0.6リットル

ペン型注射器用針対応



1リットル

2リットル

ペン型注射器用針対応

ペン型注射器用針対応



上蓋が半透明なので内容物をあからさまにすることなく収納状態を確認できます。

**注意** 危険ですから、上蓋に示された上限ライン(黒線)を超えて入れないで下さい。

### 上蓋の仮止めと密閉(1~7リットル)



① 蓋のツメを軽く押して仮止めをします。

③ 仮止めの状態です。(ツメが見えています。)

⑤ 廃棄時は上蓋を完全に押し込むと密閉されます。(ツメが見えなくなります。)



② カチッと音がするまで軽く押さえると仮止めが出来ます。



④ ツメの先を矢印の方向に押すと開きます。

**注意** 閉じるときに内容物が当たるときは危険ですので、無理に押し込まないでください。

## 組立手順・注意点



本体の上部と下部を組み立てます。



四隅をカチツと音がするまで押し込みます。外れないことを確認してください。

**注意** 外れないことをご確認のうえご使用ください。

シリンジごと廃棄が可能な汎用タイプです。上蓋には注射針や翼状針を取り外すための口と転倒時に廃棄物が出にくい内蓋が装備されています。ワゴンや壁に固定するためのブラケットやテーブルに固定できるスタンド等アクセサリが充実しています。



4リットル

ペン型注射器用針対応

7リットル

ペン型注射器用針対応



投入口は横に広いため、シリンジ・針だけではなく、大きめの廃棄物や大量処理にも適しています。また、投入口は可動式の蓋付きですので、使用中でも中身が見えず衛生的です。使用後の廃棄時は、上蓋を引上げ閉じ、押し込むと二度と開かないので、安全に処理できます。



9リットル



13リットル



24リットル



# 安全性を向上させる豊富なオプション

● オプションを組み合わせると、より使用しやすく、安全性が向上します。

ブラケット

■ ワゴンブラケット

4402 2L



■ ワゴンブラケット

4403 4L, 7L兼用



■ ワゴンブラケット

4401 1L



■ ワゴンブラケット



■ トロリーブラケット


4261B 1L

4247B 2L

4240B 4L, 7L兼用



■ トロリーブラケット

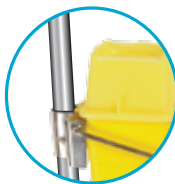

■ スタンド

■ スタンド

4253 1L

4205 2L

4252 4L, 7L兼用

4207 9L, 13L兼用



■ トレイ



■ トレイ

4300 1L, 2L兼用



※特殊仕様にて対応いたします。

## 取扱上のご注意



注意

本品は英仏の安全基準をクリアしており一定の耐貫通強度がありますが、無理に蓋をするなどした場合は針先が本体を貫通する恐れがありますので十分ご注意ください。安全にお使いいただくために次の点に留意ください。

- 本品は0.2リットル～24リットルまで各種サイズを取りそろえております。廃棄する針、シリンジの長さに合ったサイズをご使用ください。
- 本品の高さを超える長さの針や針付シリンジなどは入れないでください。また、上蓋に示された上限ライン（黒線）を超えて入れないでください。入れ過ぎの状態でも無理に蓋をすると針先が飛び出す恐れがあります。廃棄時に蓋を閉める際、硬いと感じる時は無理に押し込まないでください。
- 蓋を閉めた状態でオートクレープをかけると容器が変形して針先が貫通する恐れがあります。オートクレープ滅菌の際は蓋を開けた状態で行ってください。

## ■ シャープセイフ仕様

商品番号	容量/規格	外径寸法(mm)	針外し口	針プロテクター立て	可動式フラップ	固定器具	梱包単位	備考
4120A	24リットル	450(w) x 230(d) x 335(h)	X	○	○	オプション	10個/1ケース	大量処理
4115A	13リットル	290(w) x 190(d) x 360(h)	○	○	○	オプション	20個/1ケース	大量処理
4117	9リットル	290(w) x 190(d) x 290(h)	○	○	○	オプション	20個/1ケース	大量処理
4110	7リットル	165(w) x 165(d) x 365(h)	○	○	○	オプション	50個/1ケース	
4100	4リットル	165(w) x 165(d) x 235(h)	○	○	○	オプション	50個/1ケース	
4140	2リットル	200(w) x 115(d) x 165(h)	○	○	○	オプション	50個/1ケース	
4160	1リットル	110(w) x 90(d) x 190(h)	○	○	X	オプション	100個/1ケース	
4150	0.6リットル	105(w) x 50(d) x 220(h)	X	X	X	X	100個/1ケース	携帯
4173P	0.2リットル	75(w) x 35(d) x 150(h)	○	X	X	X	100個/1ケース	携帯、針専用

- 上蓋を最後まで閉めると二度と開きませんので、清掃業者の方にも安全です。
- 容器の材質は、耐薬品性及び衝撃に強いポリプロピレンです。
- 適切に焼却炉で処理されれば、有毒ガスは発生しません。
- 製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

frontiermedical<sup>®</sup>  
group

輸入先: フロンティアメディカル社(英国)



BS 7320:1990  
KMI5072

輸入販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0004  
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380  
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店

NP2015043000