

やわらか湯たんぽ&ひんやり枕

ひょうたんぼ

43 x 24 cm (1.8L)



ドルフィンタイプ

48 x 11 cm (1.8L)



ひんやり枕

32 x 18 cm



クッションタイプ

43 x 28 cm (2.0L)



スタンダード

24 x 14 cm (1.3L)



東京女子医科大学付属
青山自然医療研究所と
の共同開発



- 一般的な湯たんぽと違い、タオル等のカバーはらず、お湯を注げばそのまま使えます。
- 特殊なウエットスーツ素材を使用していますので、やわらかで低温やけどをしにくい自然な温かさです。
- ウエットスーツ素材は非常に保温性に優れ、肌触りが抜群です。(但し素肌での長時間の使用はおさげ下さい。)

品名	色	型番	包装	希望納入価(¥)
やわらか湯たんぽ スタンダード	ブルー	HS-01B	6個/箱	25,800/箱 単価 @4,300
	オレンジ	HS-01O		
やわらか湯たんぽ クッションタイプ	ネイビー	HC-01N	6個/箱	53,400/箱 単価 @8,900
やわらか湯たんぽ ドルフィンタイプ	ブルー	HD-01B	9個/箱	53,100/箱 単価 @5,900
	ピンク	HD-01P		
やわらか湯たんぽ ひょうたんぼ	オレンジ	HG-01O	8個/箱	70,400/箱 単価 @8,800
ひんやり枕 ひんやり型	レッド	HP-01R	10個/箱	59,000/箱 単価 @5,900
	ネイビー	HP-01N		

製造元: ヘルメット潜水株式会社 〒873-0522 大分県国東市国東町岩屋 310 番地

販売元

株式会社 **フジメディカル**

〒160-0015
東京都新宿区大京町25 新宿菅井ビル8F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
[http:// www.fuji-medical.co.jp](http://www.fuji-medical.co.jp)

販売代理店

やわらか湯たんぽ & ひんやり枕



ひとつひとつの製品が手作りで仕上げられています。

使用方法、使用上の注意


やわらか湯たんぽ

1. 平らな場所に湯たんぽを置き、お湯(70℃～80℃)約 1.5L を付属のじょうごを用いて注ぎます。

* 熱湯はやけどの原因になりますので入れないで下さい。

* 夏は冷水を入れれば、氷枕としても使用できます。

2. フタをしっかりしめます。確実にしまった事をご確認の上、ご使用下さい。

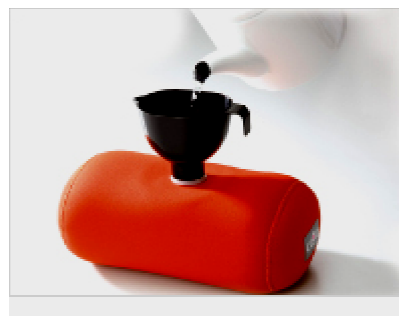

ひんやり枕



冷凍庫で8～10時間くらい冷やしてご使用ください。

二重構造式の2つの保冷剤入り枕が、寝苦しい夜にひんやり快適な睡眠を提供します。

中心部の下層に凍るタイプの保冷剤が入っているため、保冷剤が凍ってもゴツゴツせず、ジェル状の保冷剤が頭をクッションのように柔らかく受け止めてくれます。

また、保冷剤の二重構造のおかげで、適度なひんやりとした冷たさが12～14時間持続します。

● 実用新案取得済