


「シャープセイフ」取扱上のご注意

本品は英仏の安全基準をクリアしており一定の耐貫通強度がありますが、無理に蓋をす
るなどした場合は針先が本体を貫通する恐れがありますので十分ご注意ください。
安全にお使いいただくために下記の点に留意ください。

- 本体の上部と下部を組み立てる際は、四隅がカチッと音がするまで押し込み、外れないことを確認してからご使用ください。(1L～2.4L)
- 全てのサイズのシャープセイフに、廃棄の上限ラインを黒線で示しています。このラインを超えての投入は非常に危険ですので絶対におやめ下さい。(写真①)
- 本品は0.2リットル～24リットルまで各種サイズを取りそろえております。廃棄する針、シリンジの長さ合ったサイズをご使用ください。(写真①)
- 本品の高さを超える長さの針や針付シリンジなどは入れないでください。また、入れ過ぎの状態が無理に蓋をすると針先が飛び出す恐れがあります。(写真②)
廃棄時に蓋を閉める際、硬いと感じる時は無理に押し込まないでください。
- 蓋を閉めた状態でオートクレーブをかけると容器が変形して針先が貫通する恐れがあります。(写真③) オートクレーブ滅菌の際は蓋を開けた状態で行ってください。

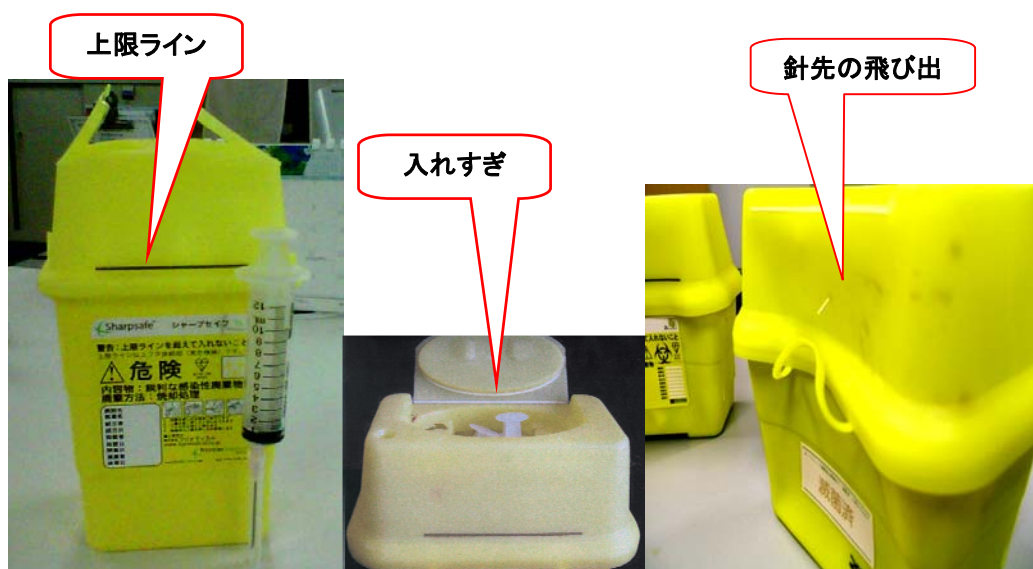

写真① (上限ライン)

写真② (入れすぎ)

写真③ (オートクレーブ)

[カタログを見る](#)