



骨盤臓器脱 (POP)

**MedGyn
シリコーン ペッサリー**

MedGyn シリコーン ペッサリーは、
医療用シリコーン製です。
化学的に安定で、オートクレーブ滅菌ができます。
(ドーナツを除く)
豊富な種類とサイズのご用意があります。



R050017#1



K050017#1



SR050026#1



CH050066#0



C050055#0



G050155#1



GS050155#1



D050010#0

製品の特徴

通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度（ステージⅠ及びⅡ）の骨盤臓器脱に適しています。

ステージⅡ及びⅢの骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。

ステージⅢ及びⅣの骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。
穴なしが基本ですが、穴ありタイプもあります。

ペッサリーの選択は、トライ & エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。

化学的に安定で、オートクレーブ滅菌ができます。

(ドーナツを除く)

MedGyn シリコン ペッサリー 使用例

【ノブ付リング】



ノブ付リング

【ゲルホーン】



ゲルホーン



ゲルホーンショート

【ドーナツ】



ドーナツ

【キューブ】



キューブ (穴なし)



キューブ (穴あり)

使用上の注意

- ・本製品は、使用前に低刺激性洗剤にて洗浄し、流水ですすいだ後、乾燥させてから使用してください。
- ・本製品の使用は、医師もしくは医師の指示を受けた医療従事者の指導の下に行ってください。
- ・膈内に炎症や出血、感染がある場合には使用しないでください。
- ・本製品を取り外した後は、必ず出血や感染がないかを観察し、必要に応じて医師の診察を受けてください。

MedGyn シリコン ペッサリー 品番リスト

一般的名称：骨盤臓器脱用ペッサリー (34149002)

サイズ	外径*	リング	サポート リング	サイズ	外径*	ノブ付リング	サイズ	外径*	ドーナツ	サイズ	外径*	ゲルホーン	ゲルホーン ショート	サイズ	外径**	キューブ (穴なし)	キューブ (穴あり)
#1	51	R050017#1	SR050026#1	#1	51	K050017#1	#0	51	D050010#0	#1	44	G050155#1	GS050155#1	#0	25	C050055#0	CH050066#0
#2	57	R050018#2	SR050027#2	#2	57	K050018#2	#1	57	D050011#1	#2	51	G050156#2	GS050156#2	#1	29	C050056#1	CH050067#1
#3	62	R050019#3	SR050028#3	#3	63	K050019#3	#2	64	D050012#2	#3	57	G050157#3	GS050157#3	#2	32	C050057#2	CH050068#2
#4	70	R050020#4	SR050029#4	#4	70	K050020#4	#3	69	D050013#3	#4	63	G050158#4	GS050158#4	#3	36	C050058#3	CH050069#3
#5	74	R050021#5	SR050030#5	#5	76	K050021#5	#4	76	D050014#4	#5	70	G050159#5	GS050159#5	#4	40	C050059#4	CH050070#4
#6	82	R050022#6	SR050031#6	#6	83	K050022#6	#5	82	D050015#5	#6	76	G050160#6	GS050160#6	#5	45	C050060#5	CH050071#5
#7	89	R050023#7	SR050032#7	#7	89	K050023#7	#6	88	D050016#6	#7	82	G050161#7	GS050161#7	#6	49	C050061#6	CH050072#6
#8	96	R050024#8	SR050033#8				#7	95	D050199#7	#8	89	G050162#8	GS050162#8	#7	55	C050062#7	CH050073#7
#9	102	R050025#9	SR050034#9											#8	63	C050063#8	CH050074#8
														#9	69	C050064#9	CH050075#9
														#10	74	C050065#10	CH050076#10

外径*はリング部の外径 (mm)

** 外径はキューブ面の直径 (mm)

製造元：メドガイソ社
医療機器認証番号：307AIBZX00029000

【製造販売元】

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

