



人体開口部用・術中用超音波プローブカバー

エコープローブカバーⅡ

医療現場の要望を取り入れ、材質や形状にこだわり
開発されたエコープローブカバー
カバー先端部を面にして折り目がプローブ先端に
入らないデザインです。



滅菌パック



滅菌ジェル
(20g)



ゴムバンド
(適宜)



スリーブ
(折り畳み時)



ドレープ包装

※ゴムバンドの数量は製品により異なります。

製品の特徴

超音波プローブの滅菌が省け、滅菌による劣化を防止します。	滅菌済みの製品です。
長さ、幅の異なる4サイズご用意しています	ポリウレタン製
超音波プローブを体液等の汚染から守ります。	滅菌ジェルが付属されてます。

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

人体開口部用・術中用超音波プローブカバー

使用方法例

01



滅菌パック及び内側のドレープ包装から本品を取り出します。

04



プローブとケーブルを適宜ゴムバンドで固定します。

02



取り出した本品の先端部に滅菌ジェルを適量注入します。

05



本品の先端部に滅菌ジェルを適量塗ります。
(体表面で仕様する場合)

03



プローブを本品先端内に装着し、気泡を取り除きながら滅菌ジェルをプローブ先端に集めます。

(クラスII)

品番	商品名	仕様	包装
P09150	エコプローブカバーⅡ 150cmタイプ	全長150cm 幅12.5cm 先端幅7.5×5.0cm	24セット/箱
P09250	エコプローブカバーⅡ 250cmタイプ	全長250cm 幅12.5cm 先端幅7.5×5.0cm	12セット/箱
P09020	エコプローブカバーⅡ 20cmタイプ	全長20cm 幅12.5cm 先端幅7.5×5.0cm	24セット/箱
P09150W	エコプローブカバーⅡワイド 150cmタイプ	全長150cm 幅15cm 先端幅10×5cm	24セット/箱

一般的名称：人体開口部用超音波プローブカバー
術中用超音波プローブカバー
体表面用超音波プローブカバー
医療機器認証番号：225AIBZX00004000

【製造販売元】

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

