



経口で挿入する使用例

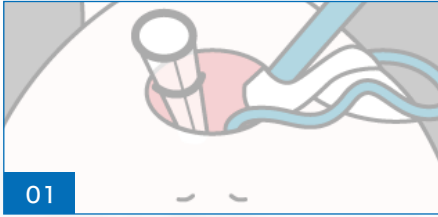


01

本品を慎重に食道まで挿入します。

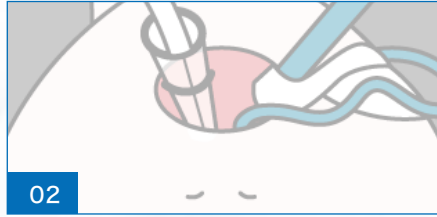


02

胃管を本品の内腔に沿って胃まで挿入します。

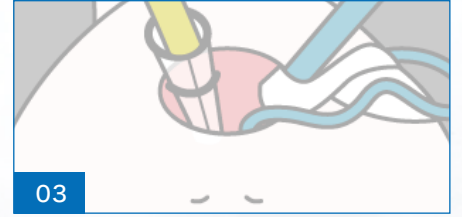


03

胃管が適切な位置に留置されているか確認してください。

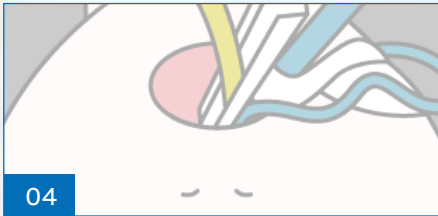

04


胃管を留置したまま、スリットを介して本品を抜去します。

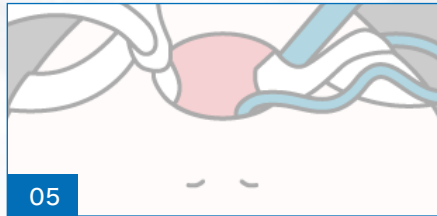

05


胃管を適切な位置に固定します。

経鼻で挿入する使用例

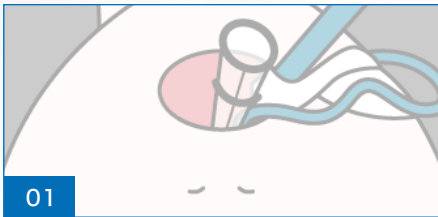


01

本品を慎重に食道まで挿入します。

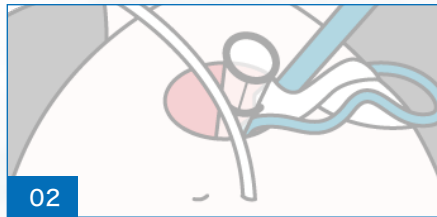


02

胃管を本品の内腔に沿って口腔内に挿入します。

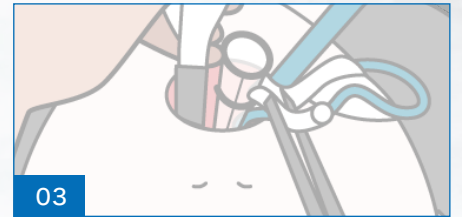

03

胃管が適切な位置に留置されているか確認してください。

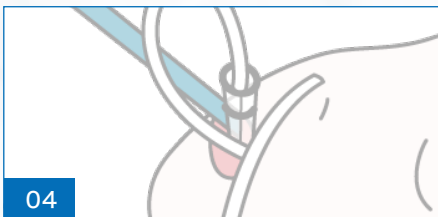

04

胃管を本品に沿って挿入し、胃まで到達させます。



05

胃液の吸引を確認、または音で確認します。



06

胃管を留置したまま、スリットを介して本品を抜去します。



07

胃管を適切な位置に固定します。

(クラスI)

品番	仕様	包装
GT70300	内径7.0mm,外径9.4mm,全長約30cm	10袋 / 箱

医療機器届出番号：13B1X00008000042 / 一般の名称：食道拡張器

【製造販売元】

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

