




プラズマ用滅菌バッグ

EN868, ISO 11607 & 11140 対応

プラズマ滅菌用アクセサリー プラズマインジケーター

GPS-250R タイプ 4 相当

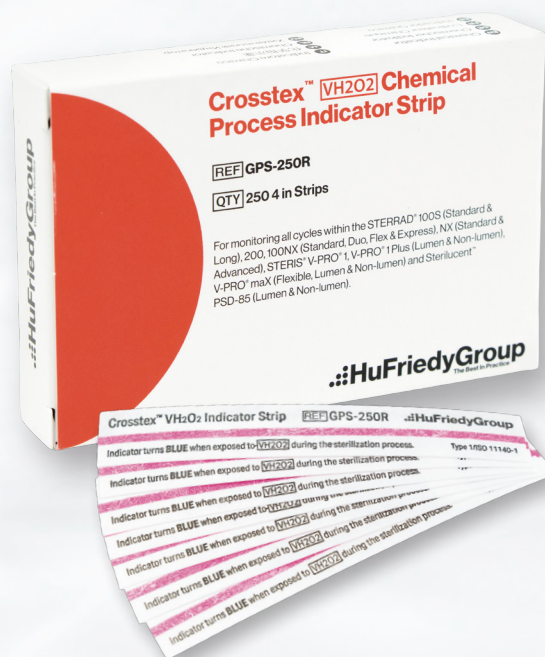



プラズマ用滅菌バッグ

EN868,ISO 11607&11140 対応

製品の特徴

ISO・EN基準適合

ロットによる製品トレースが可能

プラズマ滅菌(過酸化水素)、ガス滅菌、放射線滅菌に使用可能

シール方法は三層シール構造を採用

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。


製品仕様

USP01

三層シール構造

ご使用のシーラー種類
(インパルス方式、ヒートシール方式)
によってシール温度の差が生じる場合がありますので
ご使用前にテストシールを行ってください


推奨シール温度：110℃～130℃

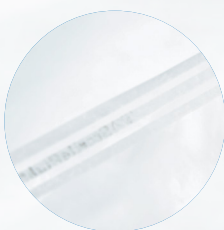

USP03

ロールスタンド

ロールに触れるパーツを
従来の紙製から
プラスチック製に変更
内包装が不要になりました

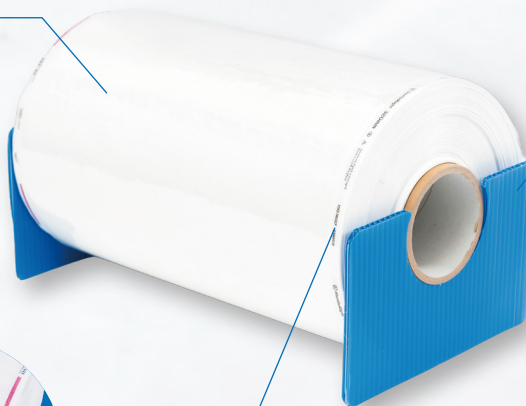

USP02

プロセスインジケータ

滅菌工程の通過を確認できる
インジケータ付き



プロセスインジケーター

滅菌前



滅菌後



プロセスインジケーターはポリエチレンフィルムとタイベック®の間に印刷されていますので、色の変化は過酸化水素（プラズマ）媒体がバッグの内側に入ったことを示しています。

（タイプⅠ）インジケーターを滅菌バッグ内に入れる業務を削減できます。

インジケーターは色の変化が見易くなるよう、太い棒線で印刷されています。

※ISO11140-1の基準に沿って安全性を担保されたインク成分を使用しています。

トレーサビリティ



院内でのロット検査を容易にするために、ロット番号を印刷しロットによる製品トレースが可能です。
また、印刷に使用されているインクは全て安全性・透過性とも国際基準をクリアしています。
ロット毎に別表の試験を実施し、出荷管理を行っています。

対応滅菌方法


タイベック®を使用して製造されています。
プラズマ滅菌（過酸化水素）、ガス滅菌、放射線滅菌に使用できます。

- ・印刷されているプロセスインジケーターはプラズマ滅菌（過酸化水素）のみに反応します。
- ・製品ごとに取扱説明書を入れていますので、使用前にご確認ください。

タイベックは、米国デュポン社の登録商標です。

プラズマ（過酸化水素）用滅菌バッグ品種表

品番	仕様(幅×長さ)	入数
TVFR-FJ05015S	50mm×150m	2巻/箱
TVFR-FJ07515S	75mm×150m	2巻/箱
TVFR-FJ10015S	100mm×150m	2巻/箱
TVFR-FJ15015S	150mm×150m	2巻/箱
TVFR-FJ20015S	200mm×150m	2巻/箱
TVFR-FJ25010S	250mm×100m	2巻/箱
TVFR-FJ32010S	320mm×100m	2巻/箱
TVFR-FJ43010S	430mm×100m	1巻/箱
TVFR-FJ49010S	490mm×100m	1巻/箱

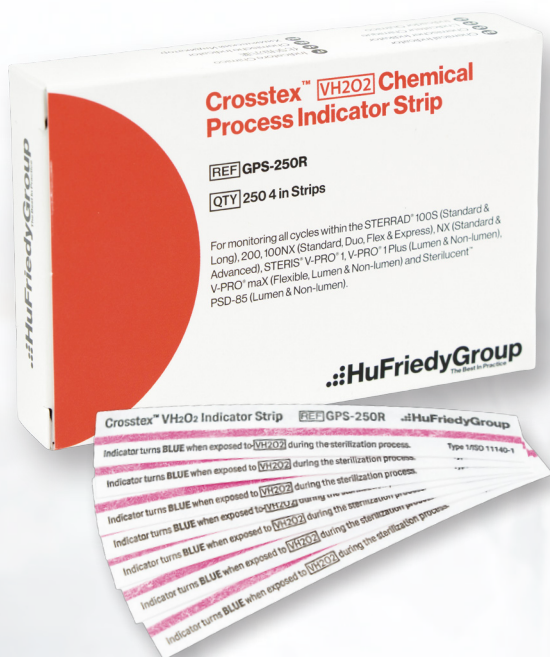

プラズマ滅菌用アクセサリー プラズマインジケーター

GPS-250R タイプ 4 相当

製品仕様

過酸化水素が滅菌包装内に入ったかどうかを、色調変化による判定が可能です。

Crosstex™ VH₂O₂ Indicator Strip REF GPS-250R HuFriedyGroup
Indicator turns BLUE when exposed to VH₂O₂ during the sterilization process. Type 1/ISO 11140-1

滅菌前 [赤]

(反応変数)

濃度 : 2.3mg/L ± 0.4mg/L

時間 : 6 分

大きさ : 1.6cm × 10cm

Crosstex™ VH₂O₂ Indicator Strip REF GPS-250R HuFriedyGroup
Indicator turns BLUE when exposed to VH₂O₂ during the sterilization process. Type 1/ISO 11140-1

滅菌後 [青] 滅菌完了

Crosstex™ VH₂O₂ Indicator Strip REF GPS-250R HuFriedyGroup
Indicator turns BLUE when exposed to VH₂O₂ during the sterilization process. Type 1/ISO 11140-1

滅菌後 [青以外] 滅菌不十分

製品の特徴

アメリカFDA承認を取得済

タイベック®素材を使用

ステラッド®滅菌を含む
過酸化水素滅菌に使用可能

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

品番	品名	仕様	入数
GPS-250R	プラズマインジケーター	タイプ4相当	250枚/箱



【製造販売元】
株式会社フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

