

# デフォッガー 内視鏡用くもり止め

DEFOGGER

放射線滅菌済の内視鏡用くもり止め



## 製品の特徴

内視鏡レンズのくもり、結露の発生を防ぐ

スポンジの裏面にあるシールを貼り付けて使用可能

放射線滅菌済み

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

# 製品仕様


USP01

フリップキャップ



USP02

スポンジはシール付きなので患者ドレープなどに貼り付けて使用できます。

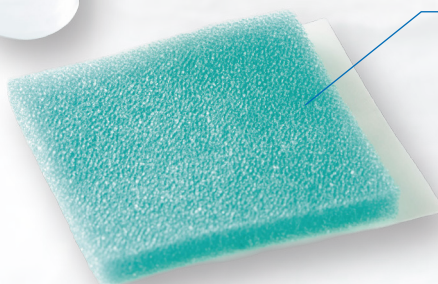

## 使用方法

- 01 デフォグガーのスポンジのシールを剥がし、ドレープ等の使いやすいエリアに貼り付けてください。
- 02 デフォグガー溶液を数滴スポンジに下します。
- 03 内視鏡レンズをスポンジ部分でやさしくこすって溶液をつけてください。(スポンジはレンズを傷つけません。)
- 04 手技が終わりましたらスポンジ、溶液は廃棄してください。

(クラスI)

品番	商品名	仕様	入数
28-0102	デフォグガー内視鏡用くもり止め	内容量6g	20本/箱

医療機器届出番号：13B1X00008000031 / 一般的名称：自然開口向け内視鏡用くもり止め



【製造販売元】  
**株式会社フジメディカル**  
〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377  
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売  
婦人科、麻酔、呼吸関連商品  
感染性医療廃棄物処理関連商品  
尿採取測定関連商品

