

# 安心ユーリンパンⅡ

## 洋式トイレ用採尿容器

洋式トイレにセットするだけで  
採尿ができる容器です。



### 製品の特徴

座位で採尿するため、両手が自由になる

便の採取にも使用可能


ポリプロピレン製

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

# 製品仕様

USP01

ツバ部分の穴は壁掛け用です。

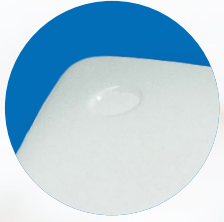

USP03

100mLからは50mL単位で800mLまで目盛がついています。(目盛は目安です)



USP02

溝を使用して尿カップや蓄尿瓶への移し替えが可能



DO NOT STERILIZE  
OZ APPROX. MEAS. CC  
27 800  
25 750  
23 700  
21 650  
19 600  
17 550  
15 500  
13 450  
11 400  
9 350  
7 300  
5 250  
3 200  
1 150

## 使用方法

01 便座を上げます。

02 「安心ユーリンパン」を便器に載せます。

03 便座を下ろして挟み込みます。

※便の採取時は、便器の後方にセットしてください。  
※単回使用です。再使用しないでください。



品番	商品名	仕様	入数
ME8105	安心ユーリンパンII	800ml	100枚/袋



【製造販売元】  
**株式会社フジメディカル**  
〒160-0004  
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F  
TEL 03-3356-8377  
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売  
婦人科、麻酔、呼吸関連商品  
感染性医療廃棄物処理関連商品  
尿採取測定関連商品

