

カメラスリーブ

CAMERA SLEEVE

内視鏡カメラヘッド・コード用滅菌カバー

ラテックス・DEHP フリー

内視鏡カメラヘッド・コードをカバーして
洗浄・滅菌の負担を減らし、機器の劣化を防ぎます。



製品の特徴

カメラヘッド・コードの滅菌等による劣化を防ぐ。

レンズに直接触れない様にカバーすることが出来ます。

青色の粘着テープ付でスリーブ端をケーブル等に固定が出来ます。

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

使用方法



- 1、滅菌袋を開け、カメラスリーブを取り出します。
スコープをカバーの先端から挿入し、台紙を取り除きます。



- 2、一方の青色の粘着テープで、スリーブ端をスコープにしっかり固定します。



- 3、カメラスリーブのリングを保持しながらスコープとカメラヘッドを接続します。



- 4、リングを保持しながら、スリーブをケーブルに沿って伸ばします。

他方の青色の粘着テープは、必要に応じてスリーブ端をケーブル等に固定します。
(使用中のケーブルの齧出を防止します)



製品仕様

品番	品名	スリーブ長/リング内径	JANコード	包装
P09072	カメラスリーブ	約255cm/約8.5cm	4719873432318	20個/箱



【製造販売元】
株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

