


ピース ピロー

PI'S PILLOW

ポリウレタン製

体位を保持するための枕です。
(特に肥満体型の方)

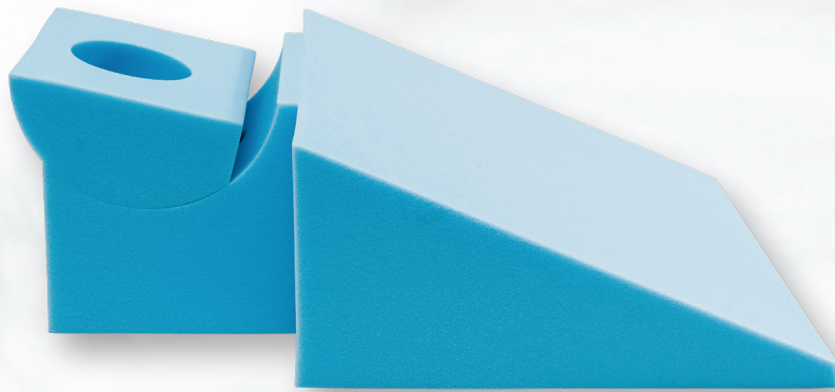

製品の特徴

スニффィングポジションを維持できる枕。

頭部保持 (RAMP POSITION) を維持できます。

ヘッド部分を取り外すことができます。

肥満手術対応用枕

品番	品名	仕様(長さ×幅×高さ)	包装単位
P1001	ピースピロー	61×46×20cm	1個/箱

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

使用方法



1、対象者の肩がどこになるかマークをつけてください。



2、臀部を動かさずに
対象者に処置台に座ってもらってください。



3、枕の肩部分がマークされた場所より
おおよそ5cm下肢側にセットします。



4、対象者にゆっくりと横になっていただきます。

使用上の注意

- ・枕は脊椎に損傷あるいは脊椎損傷可能性がある対象者には使用しないでください。
- ・枕は真空状態で包装されていますので、お届けした時に小さくなっている場合があります。その時は使用1時間前に包装を開けてください。
- ・適正なポジショニングを作るため、対象者の背中と肩の下に枕を適切においてください。
- ・ポジションを決めた後、手技が行いやすいように位置を適宜変更してください。



【製造販売元】
株式会社フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

