

ユーロダームドレープ

EURODERM DRAPE

ラテックスフリー

ポリウレタン不織布。
通気性、水蒸気透過性のあるサージカルドレープ。

製品の特徴

材質 ポリウレタン(PU)

特性 水蒸気透過性

※本カタログの製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

使用方法 単回使用汎用サージカルドレープ



1、術野を消毒・乾燥後、ユーロダームを滅菌袋から取り出し、巻き戻らないように保持してください。



2、フィルムと皮膚の間に空気が入らないように、またしわにならないように注意して、フィルムが伸びない様に引っ張らず、片側から押し付けるように貼り付けます。特に切開予定線は、滅菌ガーゼ等で押さえしっかりと貼り付けます。

※引っ張って貼り付けるとメスでフィルムをカットした際、フィルムが収縮して剥がれやすくなります。



3、最後に青テープ部のリリースライナー(白い紙)を剥がして、青テープ部を貼り付けて固定してください。

製品ラインナップ

(クラスI)

品番	大きさ(全体)	大きさ(フィルム部分)	人数/箱
717910	10cm×24cm	10cm×18cm	10
717942	42cm×42cm	42cm×36cm	
717945	45cm×55cm	45cm×49cm	
717960	60cm×52cm	60cm×46cm	
717980	80cm×60cm	80cm×54cm	

医療機器届出番号：13B1X00008000027 / 一般的名称：単回使用汎用サージカルドレープ

【製造販売元】

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1 細井ビル 5F

TEL 03-3356-8377
FAX 03-3356-8380

【事業内容】

医療機器、医療材料の輸出及び輸入販売
婦人科、麻酔、呼吸関連商品
感染性医療廃棄物処理関連商品
尿採取測定関連商品

